


MOVES[®] SLC[™]

SKRÓCONA INSTRUKCJA

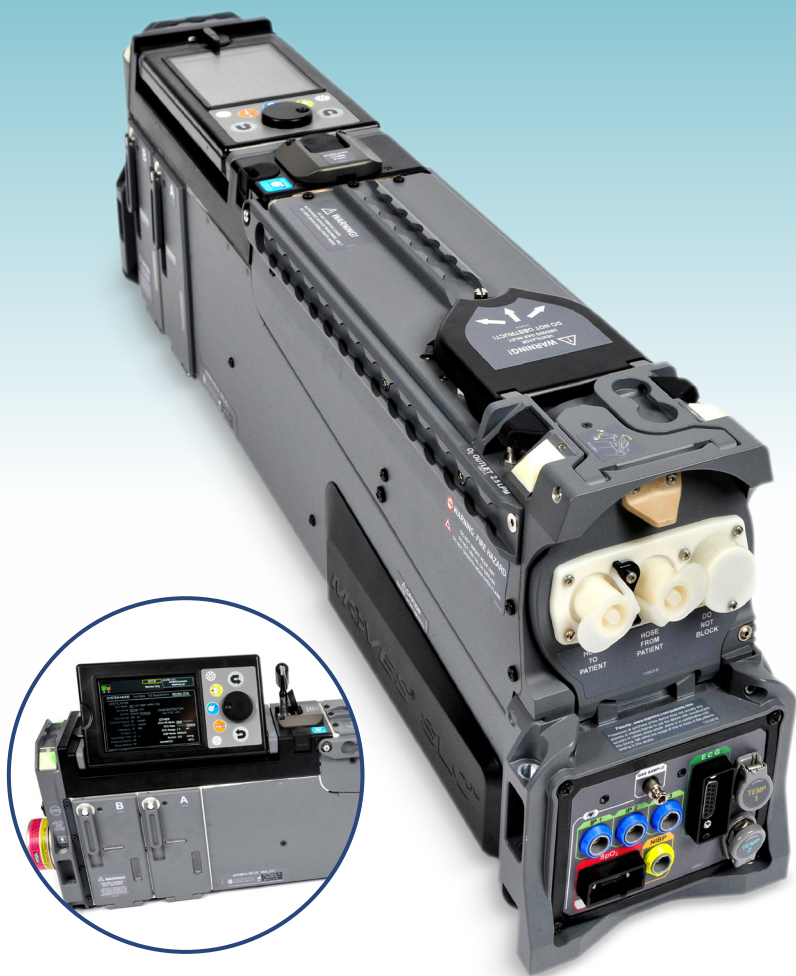

Niniejsza skrócona instrukcja używania MOVES[®] SLC[™] zapewnia dodatkowe szkolenie w zakresie użytkowania urządzenia MOVES[®] SLC[™] i nie zastępuje Podręcznika operatora.


MOVES® SLC™

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA WENTYLOWANYCH PACJENTÓW

KROK pierwszy

Podnieś blokadę zwalniającą/blokującą drzwiczki komory wkładu wentylatora w górnej przedniej części MOVES® SLC™. Włóż wkład wentylatora, zamknij drzwiczki i zablokuj je poprzez naciśnięcie blokady.

UWAGA! Nie zdejmuj z wkładu przezroczystej plastikowej owijki.

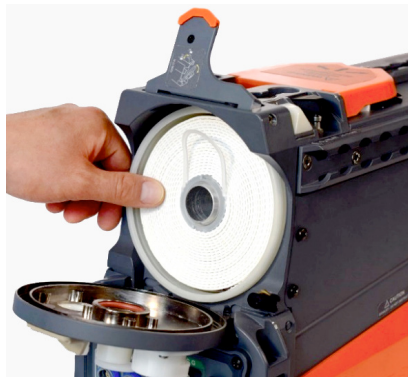


KROK drugi

Upewnij się, że na tylnym panelu MOVES® SLC™ jest zainstalowany filtr węglowodorowy.



KROK trzeci

Zamocuj chwytacz wody do portu „from patient” („od pacjenta”) na drzwiczkach komory wkładu wentylatora. Podłącz przewody obwodu oddechowego pacjenta do chwytacza wody oraz do portu „to patient” („do pacjenta”) na drzwiczkach komory wkładu wentylatora. Podłącz przewód z nafionu do linii pobierania próbek.

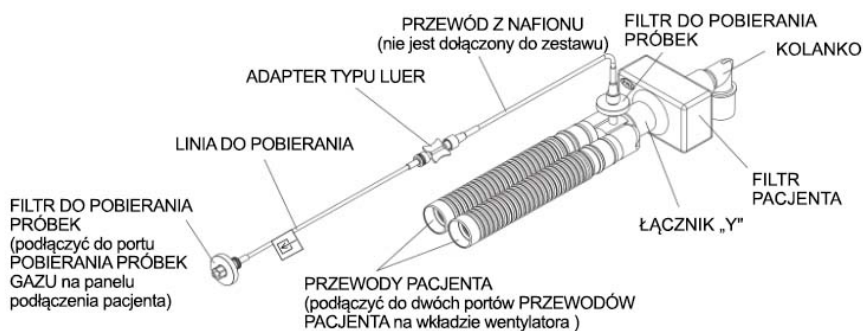

KROK czwarty

W przypadku wentylowanych pacjentów o masie ciała poniżej 30 kg lub objętości oddechowej poniżej 150 ml, filtr pacjenta na obwodzie oddechowym wentylatora należy wymienić na pediatryczny filtr pacjenta.

KROK piąty

Zamocuj pojemnik i przewód do odsysania do urządzenia MOVES® SLC™.



KROK szósty

Podłącz do urządzenia MOVES® SLC™ wszelkie akcesoria przeznaczone do monitorowania pacjenta. **NA TYM ETAPIE NIE PODŁĄCZAJ ICH JESZCZE DO PACJENTA.**

KROK siódmy

Sprawdź poziom naładowania akumulatorów MOVES® SLC™ i zainstaluj je.



KROK ósmy

Jeżeli akumulatory wymagają naładowania i/lub urządzenie MOVES® SLC™ będzie zasilane z gniazda ściennego, podłącz zasilacz/ładowarkę MOVES® SLC™ do urządzenia MOVES® SLC™.



UWAGA! Podczas pracy urządzenie MOVES® SLC™ wymaga zainstalowania dwóch akumulatorów, bądź zainstalowania jednego akumulatora i podłączenia do zasilacza/ładowarki i gniazda ściennego.


KROK dziewiąty

Włącz urządzenie MOVES® SLC™ poprzez naciśnięcie przycisku zasilania na tylnym panelu.




KROK dziesiąty

Gdy wyświetli się monit, użytkownik może skonfigurować urządzenie MOVES® SLC™ dla nowego pacjenta, wybierając YES (TAK), aby przywrócić ustawienia do wartości domyślnych. Wybranie NO (NIE) spowoduje zachowanie poprzednio używanych ustawień.

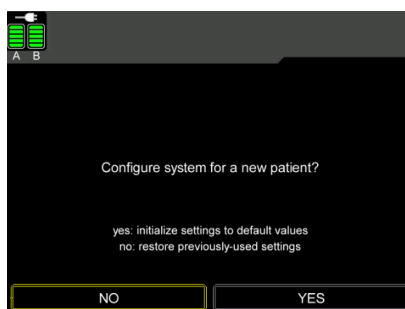

KROK jedenasty

Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje w celu przeprowadzenia testów systemu. Jeżeli wszystkie testy zostaną wykonane z wynikiem pozytywnym, wybierz CONTINUE (KONTYNUUJ).

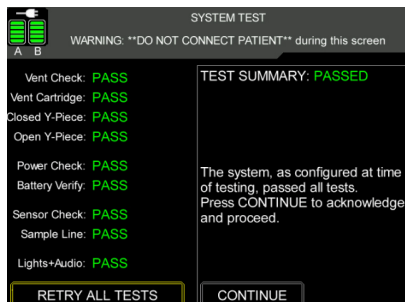


KROK dwunasty

MOVES® SLC™ przejdzie do menu Setup (Konfiguracja) i zainicjuje tryb Monitor Only (Tylko monitorowanie).



OSTRZEŻENIE:

W trybach Monitor Only (Tylko monitorowanie) i O₂ Supplement (Dodatkowy O₂) system nie zapewnia wentylacji. Przetawienie systemu do pracy w tych trybach spowoduje zatrzymanie wentylacji.

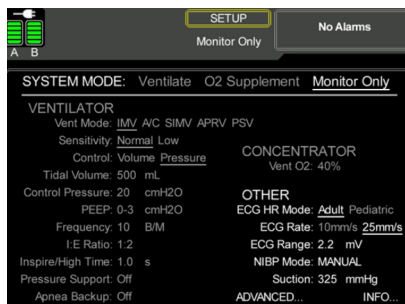


KROK trzynasty

Wprowadź wszelkie niezbędne zmiany parametrów w menu Setup (Konfiguracja) przed rozpoczęciem wentylacji pacjenta. Podłącz do pacjenta wszystkie kable systemów monitorowania pacjenta.

UWAGA! Wentylację i inne ustawienia można zmienić również wtedy, gdy system znajduje się w trybie Monitor Only (Tylko monitorowanie).

KROK czternasty

Podłącz obwód oddechowy wentylatora do pacjenta. Zmień tryb pracy systemu na Ventilate (Wentylacja). Rozpocznie się wentylacja w oparciu o wskazane ustawienia.

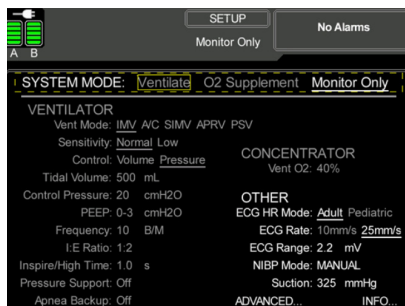

Wymiana wkładu wentylatora podczas pracy urządzenia

Jeżeli urządzenie MOVES® SLC™ emituje alarm zalecający operatorowi wymianę wkładu wentylatora:

- Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian do systemu wyjmij nowy wkład wentylatora z opakowania.
- Przejdź do menu Setup (Konfiguracja) i zmień tryb pracy systemu na tryb Monitor Only (Tylko monitorowanie) w celu zatrzymania wentylacji.
- Odłącz chwytacz wody od portu „from Patient („od pacjenta”), aby umożliwić otwarcie drzwiczek komory wkładu wentylatora.
- Otwórz drzwiczki komory wkładu wentylatora i usuń wyczerpany wkład.
- Wprowadź nowy wkład wentylatora, następnie zamknij i zablokuj drzwiczki komory wkładu wentylatora.
- Zainstaluj ponownie chwytacz wody do drzwiczek komory wkładu wentylatora i upewnij się, że przewody obwodu oddechowego pacjenta są podłączone.
- Zmień tryb pracy systemu ponownie na Ventilate (Wentylacja), aby natychmiast wznowić wentylację pacjenta.

Interfejs systemu MOVES® SLC™

Po zakończeniu testów systemu MOVES® SLC™ dostępne będą następujące ekrany:

- **SETUP (Konfiguracja):** Wyświetlanie i możliwość zmiany podstawowych ustawień pracy systemu MOVES® SLC™.
- **MAIN (Główny):** Wyświetlanie stanu pacjenta i monitorowanych parametrów fizjologicznych i systemowych.
- **ECG (EKG):** Jednoczesne wyświetlanie zapisów EKG dla wszystkich 12 odprowadzeń.
- **ALARM LIMITS (Granice alarmowe):** Wyświetlanie i możliwość modyfikacji granicznych wartości alarmowych dla alarmów fizjologicznych i systemowych.
- **ALARM ON/OFF (Alarm wł/wył):** Wyświetlanie statusu alarmowego systemu i możliwość włączania i wyłączania poszczególnych wskaźników alarmowych.
- **SYSTEM TEST (Test systemu):** Wyświetlanie statusu wykonanych testów systemu.

